



Abutment LOCATOR[®] et col pour VARIOmulti

Avantages en bref

- Système éprouvé d'attachements




- Compensation des divergences d'implants

- Convient sur tous les abutments VARIOmulti

- Montage simple



Abutment LOCATOR® et col pour VARIOMulti

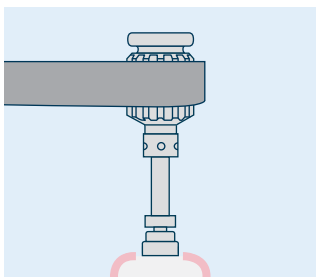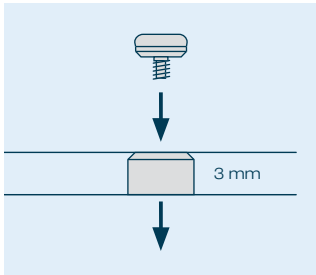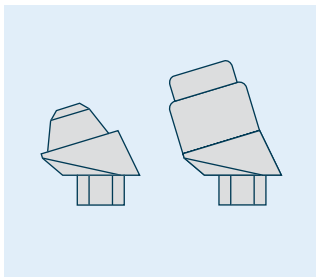

L'abutment Locator et le col pour Variomulti est utilisable sur tous les abutments Variomulti droits et angulés (17° et 30°).

Le col de 3 mm est vissé directement avec le Locator sur l'abutment VARIOMulti.

La combinaison avec les abutments angulés VARIOMulti permet de compenser des divergences importantes d'implants. L'axe d'insertion des prothèses complètes est ainsi optimisé et leur adaptation est plus facile à contrôler. Le retrait et la pose de la prothèse sont ainsi facilités pour le porteur. Ainsi, les abutments VARIOMulti offrent de nouvelles possibilités de restaurations provisoires.


Restrictions d'utilisation

- L'utilisation avec les abutments VARIOMulti PF Ø 3,5 mm est contre-indiquée.
- Ne convient pas dans les situations où la connexion doit être parfaitement rigide.

Utilisation

Visser d'abord l'abutment VARIOMulti avec le couple définitif sur l'implant. Ensuite fixer l'insert LOCATOR pour contre-angle (réf. 8913 ou 8914) sur le mandrin dentaire de l'instrument de vissage MONO court.

Visser l'abutment LOCATOR avec l'instrument de vissage MONO et la clé dynamométrique avec un couple 20 Ncm sur l'abutment VARIOMulti.

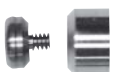

Abutment LOCATOR® et col pour VARIOMulti, 2 par unité

8909-2



Insert LOCATOR® pour contre-angle et pour instrument de vissage MONO court, acier inoxydable

Longueur

23,0 mm

8913

29,0 mm

8914



Instrument de vissage MONO, acier inoxydable/PEEK

Longueur

court*

15,4 mm

3.03.162

* L'instrument de vissage MONO (court) permet l'utilisation de tous les instruments avec mandrin



Clé à cliquet dynamométrique MONO, alliage de titane

Longueur

110,0 mm

3.03.160